


GİZLİ GÜZELLİĞİN SIRRI

YOURLINE P(LA/CL)

P(LA/CL) Nedir?

P(LA/CL) = PLLA + PCL = [Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)]

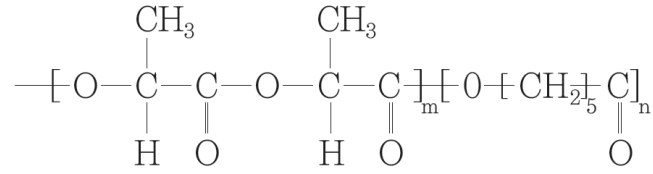

UZUN ÖMÜR

PDO'ya kıyasla daha uzun biyoçözünürlük süresi.

BİYOÇÖZÜNÜRLÜK

P(LA/CL) sütürler hidroliz sırasında ağırlıklarında çok düşük azalma oranları sergiler.

Ürün	İmplantasyondan 24-25 Hafta Sonra Kalan Ağırlık(%)
P(LA/CL) Sütür (USP 0)	%60 Üzeri
PDO Sütür (USP 0)	%30 Altı

32 Haftalık hidroliz sonrasında bile P(LA/CL) çapındaki azalma çok küçüktür.

İDEAL ÜRÜN

PLLA ve PCL'nin zayıflığının üstesinden gelir

EMİLEBİLİR SÜTÜR

İlk olarak 1990'larda Japonya'da geliştirildi. Uzun klinik deneyim ile mükemmel güvenlik ve fark garanti edilir.

P(LA/CL) Esnek ve Kararlı	PLLA(Poly L-Lactic Acid) Sert	PCL(Polycaprolactone) Çok Yumuşak, Isınmaya Karşı Hassas
-------------------------------------	---	--


PLLA VE PCL'NİN ZAYIF OLDUĞU NOKTALARI ORTADAN KALDIRAN İDEAL ÜRÜN

Material	PDO	PLLA	PCL	P(LA/CL)
İsim	Polidioksanon	Poli-L-Laktik Asit	Polilakrokapton	Poli(L-laktit-ko-E-kaprolakton)
Çözünüm	Yaklaşık 6 Ay	18 Ay Üzeri	18 Ay Üzeri	18 Ay Üzeri
Özellik	İyi	Sert	Çok Yumuşak, Isıya Dayanksız	İyi

THIN MONO SCREW

Cilt sıkılaştırma ve kolajen yapımında uzmanlaşmıştır.

Thin iplik, cildi sıkılaştırma ve kolajen oluşumunu teşvik etme kabiliyeti nedeniyle yüzün çeşitli bölgelerinde ve Peri-sternal'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Normalde ince iplikler keskin tip iğnelere yüklenir. Mono (İğneli Pürüzsüz iplik), Screw (Dokulara düz şekillendirilmiş bir ipliğe göre daha güçlü bir uyarı veren iğnenin etrafındaki sarmal iplik kıvrılır) Double Screw (Screw tipiyle aynıdır, ancak birbirine spiral olarak yüklenmiş iki düz diş). Dişli desenli ince ipliklere sahip daha fazla tip vardır: DSP tipi. DSP (iğnenin içine yüklenen ve iğnenin dışını büken dişli desenli ince iplik) tipi, güçlü kolajen oluşumu için dokulara maksimum uyarıyı getirir.

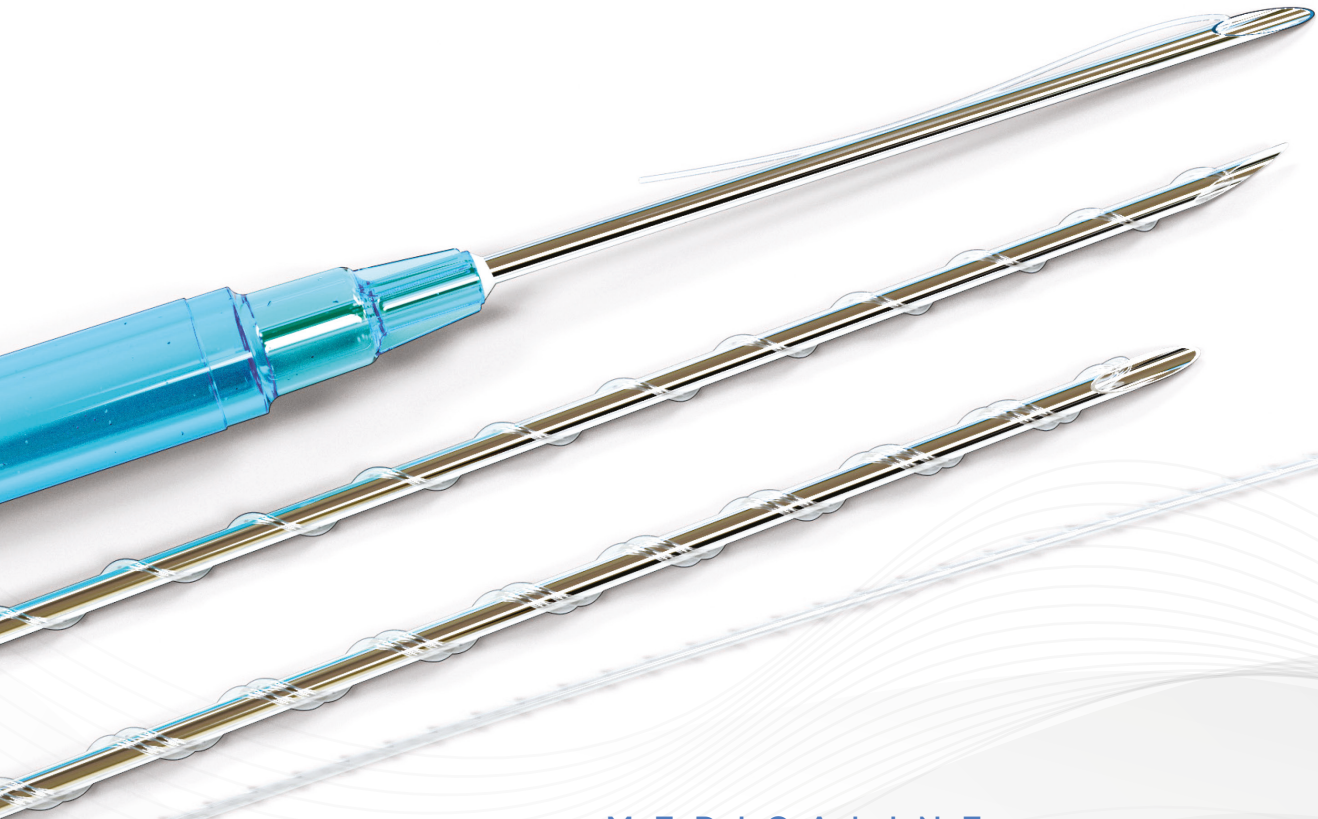

MONO

CANNULA

Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
26 ~ 30	38 ~ 90	Sharp	5-0 / 6-0	30 ~ 160

PAKET İÇİ : 1 Paket x 10 Adet



SCREW

CANNULA

Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
25 ~ 30	38 ~ 90	Sharp	4-0 / 5-0 / 6-0	60 ~ 160

PAKET İÇİ : 1 Paket x 10 Adet



DOUBLE SCREW

CANNULA

Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
25 ~ 26	38 ~ 90	Sharp	6-0 / 7-0	60 ~ 160

PAKET İÇİ : 1 Paket x 10 Adet



COGGING SCREW PLUS (DSP TYPE)

CANNULA


Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
25	38 ~ 60	Sharp	5-0	136 ~ 185

PAKET İÇİ : 1 Paket x 10 Adet



UYGULAMA(NASIL KULLANILIR)


İğneyi yerleştirin. 2~3 kez çevirin. İğneyi çıkarın. Gerekirse açıkta kalan ipliği kesin. Daha iyi bir sonuç almak için aynı anda daha fazla ip uygulayın.

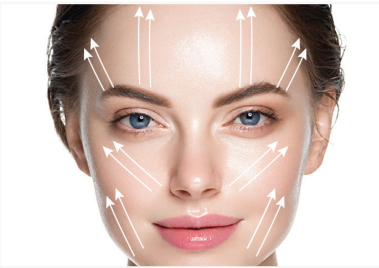

Thin Thread



Lateral Face
Thin Thread

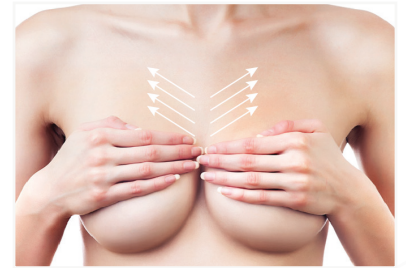

Peri-Sternal Kırışıklık
Thin Thread

BARBED COG

Geleneksel, ancak beklentilerin ötesinde.

Barbed iplik ürünleri, iplik kaldırma için en evrensel ürün grubudur. Barbed bir iplik, dişli model üretim yöntemine göre sınıflandırılabilir: Kalıplama dişli ipliği ve kesme dişli ipliği. Keskin bir iğne veya kör kanül ve içindeki iplikten oluşur. Normalde Alın ve kaş, Orta-Alt yüz (medial), Nazo-jugal oluk, Nazo-labial kıvrım, Medial kenar, Alt kenar (Kukla çizgisi) ve Ptotic memede kullanılır.



Molding Cog (SC Type) Kalıplama Teknolojisi

Bu ürünün avantajı, ipliğin gücü ve dayanıklılığıdır. Diğer dişli dişli ürünlerinden farklı olarak, bu tip, "kalıplama pres işlemi" adı verilen bir üretim yöntemi kullanılır. Diğer ürünlere göre daha kuvvetli ve sağlamdır.

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
18	100	Sharp (Keskin) veya Blunt (Künt)	1-0	185
19	100	L-Kanül / W-Kanül / R-Kanül	2-0	185

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet



Helical Cog (FE Type) 3D teknoloji Cutting

Bu tip, üç boyutlu tasarlanmış bir ipliğe sahip bir üründür. 60 derecelik açılı aralığı ile helisel dişlilere sahip olduğundan, diğer dişli desenli modellere göre daha fazla bağlama gücü sağlayan stereoskopik bir cilt tutma etkilisine sahiptir.

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
19	100	Sharp (Keskin) veya Blunt (Künt)	1-0	170
21	90	L-Kanül / W-Kanül /	2-0	160
23	90		3-0	160

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet



Helical Cog II (FE BP Type)

Bu tip, kaldırma etkilisini en üst düzeye çıkarmak için oluşturulmuştur. Helical Cog I tipi gibi, 60 derecelik açılı aralığı ile üç boyutlu sarmal tasarımı bir diş uygulanır, ancak Çift yönlü dişli deseni ile: bir dişli desen ileri gider ve sonraki dişli desen ters yöne gider.

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
19	100	Sharp (Keskin) veya Blunt (Künt)	1-0	170
21	90	L-Kanül / W-Kanül /	2-0	160
23	90		3-0	160

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet



UYGULAMA(NASIL KULLANILIR)

İğne ile cilt üzerinde bir delik açın. Kanül tipi ipliği beklenen vektörden geçirin. 3~5 tur çevirin. Kanülü çıkarın ve ipi kesin. Daha yüksek sabitleme elde etmek için iki ipliği birbirine bağlayabilir ve düğümü cilde gömebilirsiniz.




Alın ve Kaş
Barbed Thread



Orta-Alt Yüz (Medial)
Barbed Thread



Barbed Thread

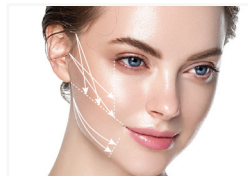

Medial Sınır - Dikey Form Yanal Canthus / Alt Sınır - Tragus için
Ağız Köşesi / Kukla Çizgisi
Barbed Thread




Barbed Thread



Sharp



Blunt 45°

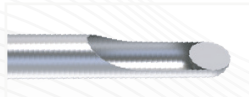

L-Cannula



W-Cannula



R-Cannula

NOSE COG

Burun kaldırma için özel iplik

Burun ipi serisi, stereoskopik hacim ve tutma burun prosedürleri için özel olarak tasarlanmıştır. Amaca göre kullanılan iki tip burun ipi ürünü (FA tipi ve FG tipi) vardır. Her iki tipin de temel yapısı, bükülmüş FE tipi ipliğin yarısının kör kanülün içine girmesi bakımından benzerdir. Aradaki fark, FA tipi ipliğin kanül iç dişinin dikenli olmamasına karşın, FG tipi ipliğin dişli bir desene sahip olmasıdır.




NOSE COG I (FA Tipi)

Burun köprüsünü etkili bir şekilde hacimlendirmek için tasarlanmıştır.

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
21	60	L-Cannula	1-0	80

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet

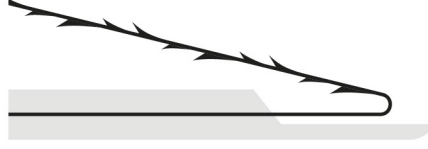


NOSE COG II (FG Tipi)

En kalın ipliği kullanarak burnun tepesini etkili bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır.

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
19	38	L-Cannula	2	50
19	50	L-Cannula	2	50

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet

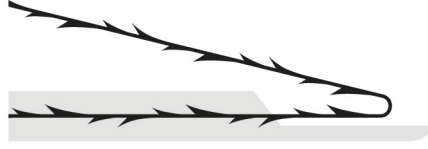

UYGULAMA(NASIL KULLANILIR)

İğneyi yerleştirin. 2~3 kez çevirin. Kaldırılan iğne. Gerekirse açıkta kalan ipi kesin. Daha iyi sonuç almak için aynı anda birçok ürün uygulayın



Nose
Nose Thread – FA Type



Nose
Nose Thread – FG Type




L-Cannula

COIL COG

Hacmi En Üst Düzeye Çıkarma


Bunlar, nihai hacim kazandırma ana amacı için künt bir kanül etrafında yoğun bir şekilde bükülmüş çok sayıda ipliktir. Alın, çene, Yanal yanak çukuru, Alt göz kapağı, Gözyaşı oluğu, Kukla çizgisi ve Dudak büyütmede etkileşimi için Multi-Fill ürünü ile birlikte kullanılır. Ağ benzeri bir şekle sahiptir, böylece kollajenden oluşan bağ dokusu iplik etrafında etkili bir şekilde oluşturulur. Dişli ipliğin aksine, fiziksel bir çekme etkisinden ziyade bir hacim takviyesi görevi görür.

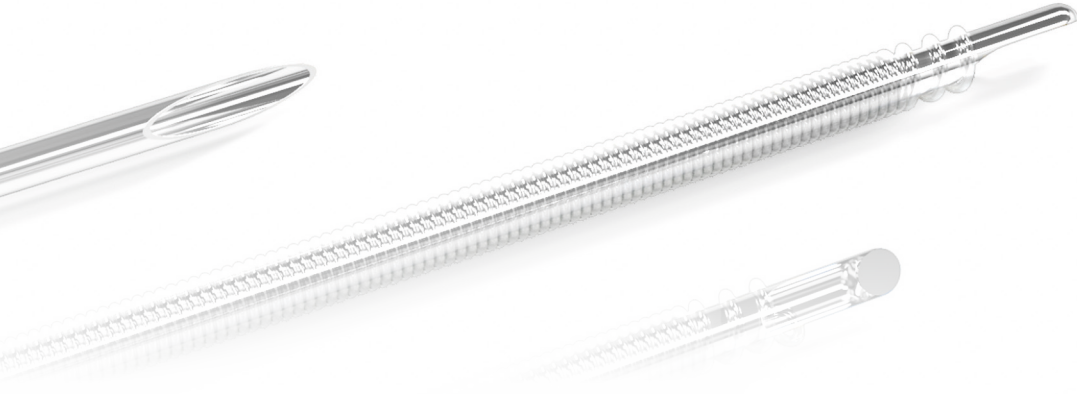

MULTI-FILL COG

Çoklu Güçlendirme Eki

Multi-Fill ürünü, künt bir kanül içeren birçok telden oluşur. Cavern-Fill'e benzer şekilde Cavern-Fill ile etkileşime girer ve alın, çene, Yan yanak çukuru, Alt göz kapağı, Gözyaşı oluğu, Kukla çizgisi, Dudak büyütme alanlarında kullanıma uygundur, ancak ek olarak kullanılabilir. Kaş büyütme, Burun ve Boyun kırışıklıklarında. Ağ benzeri bir şekle sahiptir, böylece kollajenden oluşan bağ dokusu iplik etrafında etkili bir şekilde oluşturulur. Cog ipliğinden farklı olarak, bir Fiziksel bir çekme etkisine sahip olmak yerine hacim takviyesi verir.

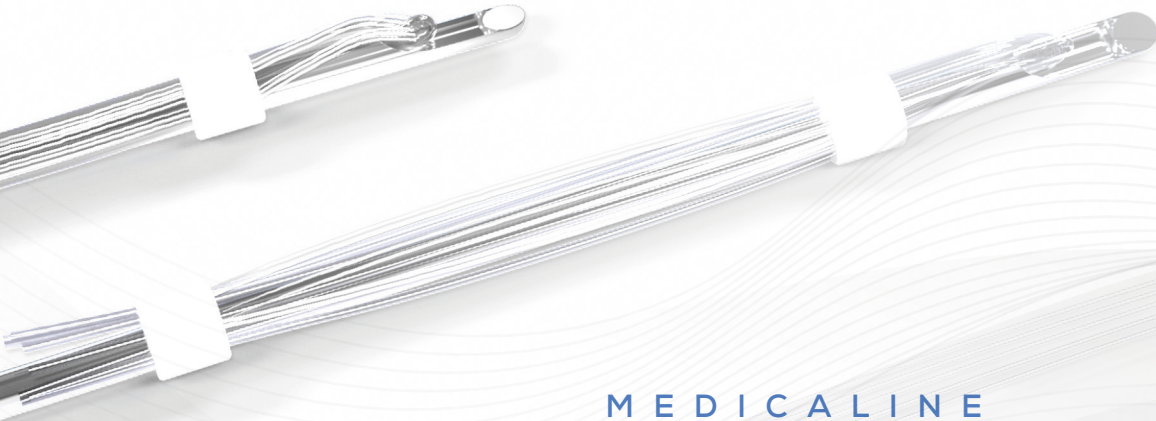

Coil Thread

CANNULA

Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
23	38	L-Cannula	5-0	15
23	60	L-Cannula	5-0	25
23	60	L-Cannula	5-0	30

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet

Multi Thread

CANNULA

Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
23	38	L-Cannula	5-0	25
23	60	L-Cannula	5-0	45

PAKET İÇİ : 1 Paket x 4 Adet

UYGULAMA(NASIL KULLANILIR) - Multi-Fill Cog

İplik tamamen deriye girene kadar içeri ittikten sonra, straforu tutarken 2-3 kez döndürün, iğneyi veya kanülü çıkarın.

UYGULAMA(NASIL KULLANILIR) - Coil Thread

İğneyi, ipliğin ucu tam olarak girinceye kadar deri içine ittikten sonra, yardımcı tüp deri içine itilirken iğne veya kanül çıkarılır ve iplik doku içinde kalır.

DİKKAT - Multi Thread & Coil Thread

Çok yüzeysel olarak yerleştirilirse derinin yüzeyi pürüzlü hale gelebilir, bu nedenle derin deri altı tabakasına yerleştirilir. Özellikle alt göz kapağına (yırtilma oluşu) yerleştirildiğinde, doku kalınlığı o kadar incedir ki ipliğin dış hatları ortaya çıkabilir, bu nedenle ipliği yerleştirirken OOM'den daha derine yerleştirilmelidir. İskele ipi ipin etrafında kolajen oluşmasına yardımcı olduğu için etkinin düzelmesi 1 ila 2 ay sürer.



Coil Thread,
Multi Thread



Coil Thread,
Multi Thread



Alt Kapak, Gözyaşı
Oluşu
Coil Thread,
Multi Thread



Çene Hattı
Coil Thread,
Multi Thread




Yanak Boşlukları
Coil Thread,
Multi Thread



Kaş
Dolgunlaştırma
Multi Thread



Dudak Büyütme
Coil Thread,
Multi Thread

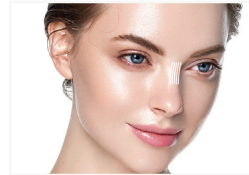

Burun
Multi Thread



Boyun Kırışıklığı
Multi Thread



L-Cannula

DUAL NEEDLE MOLDING COG

Profesyonel Çift İğne için Ürün

Bu üst düzey ürün, profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış bir dikiş (300 mm veya 420 mm) ve iki iğneden oluşur. Çift iğneli ürünlerin kendi avantajları vardır. Kullanıcılar, simetrik bir performansla sonuçlanabilecek ayrıntılı prosedür yolunu manuel olarak doğru bir şekilde kontrol edebilir. Profesyoneller, kan damarlarına verilen hasarı azaltmak ve yerleştirme sırasında morarmayı azaltmak için künt uçlu iğneler önermektedir. Çift iğneli iplikler tipik olarak Alın, Yan Yüz, Orta, Ağız köşesi vb.

Molding Cog (SC Type)

Bu, Yurim Medical'in Molding cog ipliğine sahip ilk Çift iğneli üründür. Bu ürünün avantajı, ipliğin gücü ve dayanıklılığıdır. Diğer dişli ürünlerinden farklı olarak, bu tipte "kalıplama" adı verilen bir üretim yöntemi kullanılır. "Dişli kalıp işleme ile üretilen diğer tiplere kıyasla çok küçük kuvvet kaybıyla sonuçlanan pres işlemi".



Helical Cog (FE Type)

Bu, üç boyutlu tasarlanmış bir ipliğe sahip çift iğneli bir üründür. FE tipi uzun süredir prosedürlerde kullanılmaktadır. 60 derecelik açı aralığına sahip helical dişlilere sahip olduğundan, bu tip daha büyük bir görünüm sağlayan stereoskopik bir cilt tutma etkisine sahiptir. Diğer dişli desenli modellerden daha bağlama gücü. Çift iğne ve FE tipleri arasındaki kombinasyon muazzam bir performans getirecektir.



Dual Needle Ürün Özellikleri

CANNULA			SUTURE	
Gauge	Lenght(mm)	Type	USP	Lenght(mm)
21	110	Ters kesim veya Blunt (Künt)	1-0	300
21	110	Ters kesim veya Blunt (Künt)	1-0	404/420


PAKET İÇİ : 1 Paket x 1 Adet

İğne Tipi Ayrıntıları


Type	Needle tip details	Side view
Ters Kesim		
Blunt (Künt)		

UYGULAMA(NASIL KULLANILIR)

Ekleme noktasındaki çukurlaşmaya dikkat edin. Aşırı düzeltme düzensizliği artırabilir. W-uygulaması şakak bölgesinde ağrıya neden olabilir. Parotis bezi bölgesinde bezin zarar görmemesi için deri altı tabakasından geçmesi gerekir. İpliği deri altı yağ tabakasından geçirin. Nazolabial bölgede fasiyal sinirin terminal dalına zarar vermemeye özen gösterilmelidir.

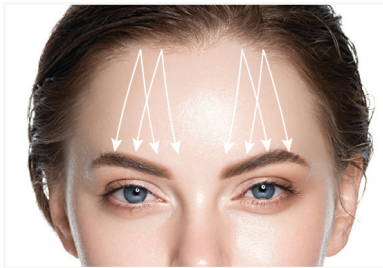


Alın
Dual Needle - Kısa Tip 300 mm
Medial & Lateral Kaldırma

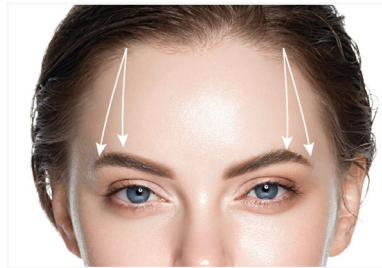

Alın
Dual Needle - Kısa Tip 300 mm
Lateral Kaldırma



Lateral Yüz
Dual Needle - Uzun Tip 404mm
W Şeklinde / U Şeklinde Uygulama

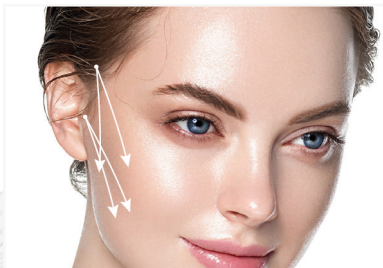

Lateral Yüz
Dual Needle - Kısa Tip 300mm
V Şeklinde Uygulama



Boyun
Dual Needle - Uzun Tip 404mm



Ağız Köşesi Kaldırma
Dual Needle - Kısa Tip 300mm



Güzelliğin
İçin Değer

info@medicaline.com.tr

0212 238 73 50

www.medicaline.com.tr

Cumhuriyet Mah. İncirli Dede Cad. No: 8 Sinpaş Queen Rezidans Şişli İstanbul

